

MECTRON PROPHYLAXIE P3 - LA FORME IDÉALE POUR UNE PROPHYLAXIE PARFAITE : SUPRA ET SOUS-GINGIVALE




new!

mectron

NOUVEL INSERT DE PARO P3

spécialement conçu pour l'élimination du biofilm bactérien supra et sous-gingival tout en douceur.

- La forme fine permet un accès facile dans les espaces interproximaux et dans les poches parodontales dans tous les quadrants dentaires.
- Il est sans danger pour les tissus mous, peu invasif sur le cément radiculaire et préserve l'épithélium grâce à son mouvement remarquablement linéaire.
- Garantit un excellent nettoyage sous-gingival et dans les espaces interdentaires.
- Élimine de manière efficace les colorations extrinsèques.
- Offre au praticien un contrôle intra-opératoire optimal et un maximum de précision dans l'accès interproximal supra et sous-gingival.
- Traitement tout en douceur avec un maximum de confort pour le patient grâce à la fonction SOFT MODE.

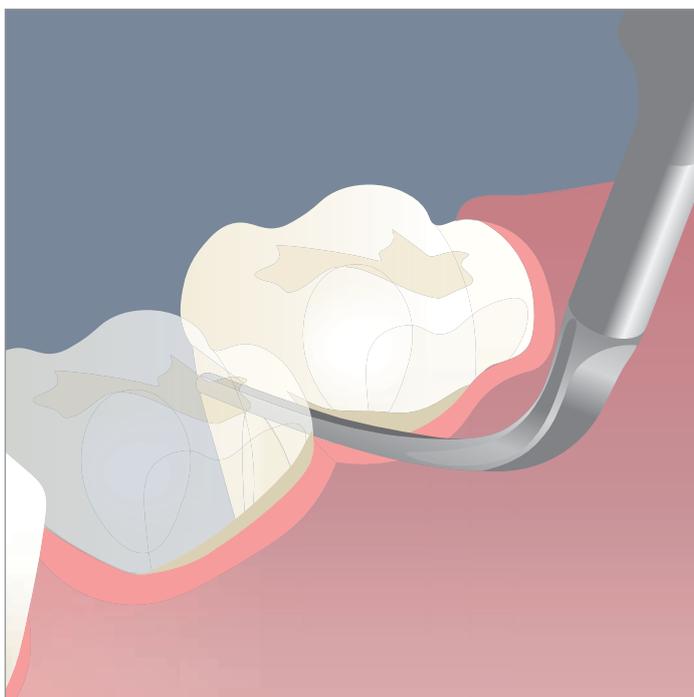


❖ COMMENT BIEN UTILISER L'INSERT P3 ?

L'insert effectue un mouvement linéaire tout en préservant les tissus mous et la limite gingivale.

La force appliquée par l'insert sur la dent doit être très légère.

Il est recommandé de régler la puissance au minimum avec un niveau d'irrigation moyen. Si disponible activer la fonction SOFT MODE qui évite toute oscillation excessive de l'insert en permettant un mouvement doux et efficace.

Les patients sensibles sont traités quasiment sans douleur en offrant un maximum de confort au praticien.

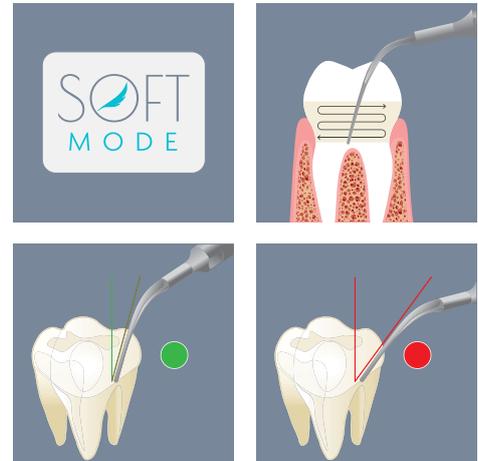

avec l'aimable autorisation du Dr Giacomo Oldoini (La Spezia, Italie)

Nos leaders d'opinion ont déjà confirmé l'efficacité de l'insert P3, ainsi que sa sécurité et le confort dans diverses situations cliniques.

“Insert très fin et de forme allongée qui permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès. Très performant et peu invasif dans l'élimination du biofilm supra-gingival et à l'intérieur des poches parodontales tout en respectant les tissus mous. Indiqué également dans le traitement des patients ortho sans compromettre l'intégrité des bagues orthodontiques.”

Dr Stefano Checchi, Torino, Italie

“Le nouvel insert P3 est parfaitement adapté pour la préparation initiale et la maintenance parodontale. Sa forme courbe et allongée facilite l'accès dans les poches de différentes profondeurs, notamment dans le cas de biotypes gingivaux très fins. Spécialement conçu pour l'élimination de calculs et biofilm sous-gingivaux.”

Dr. Giacomo Oldoini, La Spezia, Italie

→ L'INSERT P3 EN DÉTAIL



INSERT P3 Réf. 02970003-001

Insert fin et lisse comme une sonde parodontale.

Indications: élimination délicate de calculs et du biofilm dans les espaces interproximaux supra et sous-gingivaux.

CLÉ DE SERRAGE K10

Chaque insert est fourni avec sa propre clé de serrage permettant à la fois d'optimiser les mesures d'hygiène dans le cabinet et de faciliter la stérilisation.



Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les inserts sont des dispositifs médicaux composants d'appareils de classe IIa, selon la directive européenne applicable en vigueur. Ils portent le marquage CE.

mectron
medical technology



→ VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

mectronfrance@mectron.fr

www.mectron.fr

▶ N° Vert 0800 91 57 26

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italie
Tous droits réservés. Les textes, images, photos et graphiques des brochures Mectron sont protégés par le droit d'auteur et par d'autres dispositions légales en matière de protection. Sans autorisation écrite de mectron S.p.A., le contenu ne peut être copié, diffusé, modifié ou rendu accessible à des tiers à des fins commerciales.